

Grip Ribbon - Self-propelling the wheelchair

Manual

Granskad 12.6.26

Increases grip strength in self-propelling the wheelchair. Mesh-like tubular ribbon is used on the hand to enhance friction between contacting surfaces when grip strength is weakened. Structured to be mesh-like, breathable, and adaptable to the shape of the hand. You can cut a hole for the thumb in the tubular ribbon to suit its purpose. The mesh structure of the product does not unravel. Not for sports use.

Can be machine washed in a 60-degrees Celsius with mild detergent, rinsing is recommended. The product is used at room temperature.



Technical information

Quantity: Two pieces (one for each hand).

Size: 2 pcs. Size S = 25 x 34 cm (L x max. W). Size L = 25 x 41 cm (L x max. W).

Colors: Purple (size S), black (size L).

Material: SEBS. Free from latex and silicone. Made of synthetic rubber.

Recycling: General waste.

Medical device. Date of manufacture indicated on the barcode label.

Any serious incident should be reported to CareCare Ltd. and to the Finnish Medicines Agency (Fimea) using the User Incident Report Form.

Basic UDI-DI 643005903GR020WC

Manufacturer:

CareCare Ltd. FI-MF-000017782

Kirkkokatu1a A6

FI-80110 Joensuu

www.en.carecare.fi

sales@carecare.fi

Sales: +358 50 511 2779

Production: +358 50 524 7559



SEBS



Made in
Finland



Kitkanauha - Pyörätuolikelaukseen

Käyttöohje

Tarkastettu 12.6.26

Pyörätuolikelauksen apuväline käteen lisäämään otevoimaa. Verkkomaista tuubinauhaa käytetään kädessä lisäämään kitkaa kosketuksessa olevien pintojen välillä, kun otevoima on heikentynyt. Kitkanauha on rakenteeltaan verkkomainen, hengittävä ja käden muotoihin mukautuva nauha. Putkimaiseen tuotteeseen voit leikata reiän peukalolle käyttötarkoituksen mukaiseen kohtaan. Tuotteen verkkomainen rakenne ei purkaudu. Ei urheilukäyttöön.

Voidaan pestä 60°C konepesussa miedolla pesuaineella, suositellaan huuhtelua. Käytetään huonelämpötilassa.



Tekniset tiedot

Määrä: 2 kpl (yksi kumpaankin käteen).

Koko: 2 kpl. Koko S = 25 x 34 cm (P x maks. L). Koko L = 25 x 41 cm (P x maks. L).

Värit: Lila (koko S) ja musta (koko L).

Materiaali: SEBS. Ei sisällä lateksia eikä silikonia. Valmistettu synteettisestä kumista.

Kierrätys: Sekajäte.

Lääkinnällinen laite, valmistus pvm. viivakooditarrassa.

Vaaratilanteista pyydetään ilmoittamaan CareCare Oy:lle ja Fimeaan Käyttäjän vaaratilanneilmoituslomakkeella.

Basic UDI-DI 643005903GR020WC

Valmistaja:

CareCare Oy FI-MF-000017782

Kirkkokatu1a A6

FI-80110 Joensuu

www.carecare.fi

sales@carecare.fi

Myynti +358 50 511 2779

Tuotanto +358 50 524 7559



SEBS



Valmistettu
Suomessa

